



desam® GK

Také pro
strojové čištění

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aldehydů a KAS, určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů.

Naše Plus:

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Výborná materiálová snášenlivost
- Vhodný pro ruční i strojovou dezinfekci
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití:

desam® GK je určený k manuální dezinfekci i strojovému čištění všech vodovzdorných a omyvatelných ploch a předmětů v oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně, obecné hygieně, v institucích a také v potravinářství, stravovacích provozech a ve veterinární praxi.

Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, plasty, pryž a akryláty.

Návod na použití:

desam® GK se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20–25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aminů či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přicházejí do styku s potravinami, opláchněte řádně vodou.

Použití	Koncentrace	Expozice
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů	2% 0,5%	15 min. 4 hod.
Dezinfekce a čištění ploch při zvýšené zátěži	2%	30 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní (Adenovirus, Poliovirus), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní (B. Subtilis)

Účinnost	Norma	Expozice					
		2´	5´	15´	30´	60´	4 h
Baktericidní	EN 1276, EN 13727 ²			2%			
	EN 1040, EN 13727, EN 1276 ¹						0,5%
Baktericidní (MRSA)	SOP- SZÚ ¹	0,12%					
Fungicidní (C. albicans, A. niger)	EN 13624, EN 1650 ²			2%			
	EN 1276, EN 13624 ¹						0,5%
Mykobaktericidní (M. avium, M. kansasii)	SOP- SZÚ ¹				1%		
Virucidní (Adenovirus)	DVV/RKI ²		1,5%				
Virucidní (Poliovirus)	EN 14476 ²					5%	
Virucidní (E. Coli bakteriofág)	SOP ²				2%		
	SOP ¹						0,5%
Sporicidní (B. subtilis)	SOP- SZÚ ¹					4%	

Složení:

100 g přípravku **desam® GK** obsahuje následující aktivní látky:

- 6 g Glyoxal
- 3,5 g Glutaraldehyd
- 2,3 g Kvarterní amonné sloučeniny, Benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy

Životní prostředí:

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	bezbarvá kapalina
zápach (vůně)	charakteristický (aldehydy), s obsahem vonné kompozice

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
desam® GK	1 l láhev	12
	5 kg kanystr	1
	50 kg sud	1

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neskladujte na přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály.

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schulke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 577
www.schulke.sk