



desam® OX

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše Plus:

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Šetrný k dezinfikovaným materiálům
- Ohleduplný k životnímu prostředí
- Kompatibilní se systémem suchých utěrek
- Účinný na C.difficile

Oblast použití:

desam® OX je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace). Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexi-skló). Nepoužívat na pozinkované povrchy, barevně nestabilní a mechanicky poškozené povrchy. Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Návod na použití:

desam® OX se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vodě o teplotě 20 °C – 25 °C. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky.

Použití	Množství	Expozice
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů ZP	1%	15 min.
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů ZP při zvýšené zátěži	1%	30 min.
schülke wipes safe&easy	2%	5 min.

Účinnost:

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní na C. difficile

Účinnost	Norma	Doba expozice				
		5 min.	15 min.	20 min.	30 min.	60 min.
Baktericidní	EN 13727 ² EN 13697 ² EN 1276 ²		1%			
	EN 16615 ²	2%				
Levurocidní (C. albicans)	EN 13624 ²		1%			
	EN 13697 ²		1%			
	EN 16615 ²	2%				
Fungicidní (C. albicans, A. niger)	EN 13624 ²			1%		
	EN 1650 ²		1%			
	EN 13697 ²				3%	
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI ¹	2%	0,25%			
	DVV/RKI ²		0,5%			0,25%
Virucidní (Vaccinia)	DVV/RKI ¹	2%	0,25%			
	DVV/RKI ²		1%			0,5%
Virucidní (Rota)	DVV/RKI ¹	2%				
Mykobaktericidní / tuberkulocidní (M. avium, M. terrae)	EN 14563, EN 14348 ²				1%	
Sporocidní (C. difficile)	EN 14347 ¹				5%	

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

Složení:

100 g přípravku **desam[®] OX** obsahuje následující účinné látky:

- 11 g Peroxid vodíku
- 2 g Didecyldimethylammonium chloride
- 2,8 g Alkyldimethylbenzylammonium chloride

Další složení:

povrchově aktivní látky, parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

Vzhled	světle nažloutlá kapalina
Zápach (vůně)	charakteristická po peroxidu
Hustota	cca. 1,046 g/cm ³ / 20 °C
Hodnota pH (při 20°C)	4,8 (koncentrát)

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Plochy a předměty, které byly ošetřeny směsí a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, kůže a neošetřené dřevo, barevně nestabilní a porézní materiály.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
desam [®] OX	lahev 1 l kanystř 5 kg	12 1

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 1023]

Životní prostředí:

Společnost Schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SR: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schulke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk