



Tekutý dezinfekční a dekalciфикаční přípravek na bázi aktivního kyslíku určený pro cyklus chemické dezinfekce a dekalciфикации dialyzačních jednotek a systémů vodních okruhů.

Na dialýzy

dialox®

Naše Plus:

- Dezinfekce, čištění a dekalciфикация v jednom kroku
- Účinnost při nízkých teplotách
- Prevence tvorby biofilmů ve vnitřních okruzích
- Výborná materiálová kompatibilita
- Více než 20 let zkušeností v dialyzačních provozech

Oblast použití:

dialox® je určený pro:

- pravidelnou chemickou dezinfekci a dekalciфикаци dialyzačních jednotek a systémů vodních okruhů
- rychlou dezinfekci dialyzačních jednotek mezi jednotlivými pacienty
- dezinfekci hydrauliky, okruhů a generátorů dialyzačních jednotek při odstavení nebo pozastavení dialyzační jednotky
- zabránění růstu biofilmu ve vnitřních okruzích

Návod na použití:

dialox® je určený k přímému použití. Dávkování si zajišťuje automaticky dialyzační přístroj dle doporučení výrobce dialyzační jednotky. Postupujte dle návodu na použití uvedeného na obale. Reziduální kontrolu provádějte pomocí testovacích proužků dle operačního manuálu dialyzační jednotky.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Účinnost	Norma	Expozice (konc./ teplota)
Baktericidní	EN 14561	10 min (1% / 20 °C)
Levurocidní (C. albicans)	EN 14562	10 min (1% / 20 °C)
Fungicidní (A. niger)	EN 14562	10 min (3% / 37 °C)
Mykobaktericidní (M. terrae, M. avium)	EN 14563	10 min (2,85% / 20 °C)
Virucidní (Enterovirus Polio1, HIV/HBV/HCV)	NTF	15 min (2,94%)
Sporicidní (B. cereus)	NTF	10 min (8% / 37 °C)
Sporicidní (B. subtilis var niger)	NTF	15 min (2,94% / 37 °C)

Složení:

100 g dialox® obsahuje následující aktivní látky:

- 6,9 g peroxid vodíku
- 3,6 g kyselina octová
- 0,4 g kyselina peroctová

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled zápach (vůně) hodnota pH	bezbarvá kapalina Charakteristický, štiplavý Cca 1 (20 °C)
---------------------------------------	--

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
dialox®	5 kg kanistr	1

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte dialox® s jinými výrobky, především s aldehydovými nebo halogenovými deriváty. Při práci s přípravkem používejte ochranné pracovní pomůcky a zajistěte dostatečné větrání.

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 0297]

Životní prostředí:

Společnost schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Bioxal SA
Route des Verennes
71 100 Chalon sur Saone
France

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schulke.com

Distributor v CZ:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk