



Na citlivé
povrchy

terralin® protect

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinace KAS a aminu, určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše plus:

- Bez obsahu aldehydů
- Výborné čisticí vlastnosti
- Použití také ve špatně větratelných místech
- Vhodný k dezinfekci vodoléčebných van

Oblast použití:

terralin® protect je vhodný pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatalogie). Je vhodný také na citlivé plasty (akryláty, plexi).

Návod na použití:

terralin® protect se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpky, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky.

Použití	Koncentrace	Expozice
Běžná dezinfekce ploch a povrchů ZP	0,25%	15 min.
Dezinfekce ploch a povrchů ZP při zvýšené zátěži (ARO, JIP...)	0,5% 2%	60 min. 15 min.

Účinnost:

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Noro / Rota, tuberculocidní, fungicidní

Účinnost	Norma	Doba expozice					
		1 min.	5 min.	15 min.	30 min.	1 hod.	2 hod.
Baktericidní	DGHM ²			2%		0,5%	
	EN 13697 ²					0,5%	
	EN13727 ²		0,25%				
	EN 1276 ² (Salmonella choleraesuis, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, E. coli)		0,5%	0,25%			
	DGHM ² (ESBL)			0,5%			
	EN 1276 ² (C. difficile, C. sporogenes-vegetative form)		0,25%				
Levurocidní (C. albicans)	DGHM ²			2%		0,5%	
	EN 1275 ¹		0,25%				
Fungicidní	DGHM (A. niger)			2%		1%	
	EN 1275 ² , EN 1650 (A. niger)					0,5%	
	DGHM (Microsporium)					0,25%	
	DGHM (Trichopython)	0,5%					
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI		0,25%				
Virucidní (Vaccinia)	DVV/RKI ¹			0,25%			
	DVV/RKI ²			1%		0,5%	
Virucidní (Polyoma SV40)	DVV/RKI ¹			0,5%			
	DVV/RKI ²			1%			
Virucidní (FCV – Noro)	DVV/RKI ¹					0,5%	
Virucidní (Rota)	DVV/RKI			0,25%			
Tuberculocidní (M. Terrae)	DGHM ²						0,5%
Mykobaktericidní (M. terrae, M. avium)	EN 14348 ⁽¹⁾			0,5%			
	EN 14348 ⁽²⁾					0,25%	

terralin® protect

Složení:

100 g přípravku terralin® protect obsahuje následující aktivní látky:

- 22 g Benzalkonium chloride
- 17 g Phenoxyethanol
- 0,9 g Aminoalkylglycine

Další složení:

5–15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled hustota	zelená kapalina cca. 1 g/cm ³ / 20 °C
-------------------	---

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Při používání přípravku doporučujeme nosit rukavice.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
terralin® protect	lahev 2l	5
	kanystr 5l	1

Doba expirace:

36 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

 **Air Liquide**
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

 www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk