



Tekutý neutralizační přípravek na bázi kyseliny citronové pro strojový reprocessing zdravotnických prostředků a laboratorního vybavení.

**Strojový  
reprocessing –  
neutralizace**

## thermosept® NKZ

### Naše plus:

- Bez obsahu fosfátů a tenzidů
- Výborná materiálová kompatibilita
- Prevence proti tvorbě usazenin
- Optimalizuje čistící účinek po neutrálním čištění
- Účinná neutralizace po alkalickém čištění

### Oblast použití:

Vhodný pro neutralizaci po alkalickém čištění, během automatického reprocessingu chirurgických, mikrochirurgických a MIS nástrojů, nerezových kontejnerů, rigidních endoskopů, anesteziologického vybavení, obuvi a kojeneckých lahví.

Dále je vhodný pro kyselé předčištění nástrojů z nerezové oceli. **thermosept® NKZ** je určen pro použití v mycích dezinfektorech a multi-komorových mycích dezinfektorech.

Používá se k neutralizaci po **thermosept® RKF**, **thermosept® RKN – zym**, **thermosept® alka clean forte**.

### Návod na použití:

Dávkování probíhá automaticky pomocí integrovaného dávkovacího zařízení v mycím dezinfektoru. Prosím dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

#### Dávkování:

**Po alkalickém čištění: 0,1–0,2% (1–2 ml/l)**

**Po neutrálním čištění: 0,1% (1 ml/l)**

Pro finální oplach v rámci automatického reprocessingu použijte demineralizovanou vodu.

**Pro kyselé předčištění předmětů odolných vůči působení kyselin:**  
0,2–0,5% (2–5 ml/l) / 40 °C – 60 °C / 30 min.

Po aplikaci je nutný důkladný oplach demineralizovanou vodou.

# thermosept® NKZ

## Složení:

- organické kyseliny

## Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	bezbarvá tekutina
ph	cca. 2
pH 2% roztok	cca. 3,2
hustota	cca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C

## Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Při manipulaci s koncentrátem používejte osobní ochranné pomůcky – rukavice. Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.

## Logistické informace:

Název produktu	Balení
thermosept® NKZ	5 kg 20 kg

## Doba expirace:

60 měsíců

## Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. I



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

 **Air Liquide**  
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

## Další informace:

Navštivte webové stránky:

 [www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

## Výrobce:

**Schülke & Mayr GmbH**  
Robert Koch Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
+49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894  
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368  
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808  
e-mail: [schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: + 420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
[www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)